

изготовлены из высококачественного натурального латекса. Протестированы электроникой. Только для одноразового использования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1

Презерватив извлекается из упаковки только непосредственно перед применением. Вскрыть упаковку и осторожно извлечь презерватив, избегая его повреждений ногтями, ювелирными украшениями и т. п.



2

Сжать кончик презерватива большим и указательным пальцами, чтобы удалить из него воздух.

3

Поместить презерватив на головку пениса и раскатать его на всю длину. Презерватив надевается до контакта пениса с телом партнера во избежание нежелательной беременности и заражения венерическими заболеваниями.



4

Извлечь пенис после эякуляции, придерживая презерватив у основания во избежание его соскальзывания.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. В случае необходимости применения дополнительной смазки, применяйте только рекомендованный тип смазки.
2. При желании с презервативом можно применять спермицидный крем.
3. Избегайте применения смазок на масляной основе, как например масляное желе, детское масло и кремы, массажные масла, сливочное масло, маргарин и т. д.; так как они могут повредить презерватив.
4. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о совместимости медицинских препаратов наружного применения, применяемых для пениса или влагалища, с презервативом.
5. Никогда не используйте презерватив повторно. Используйте новый презерватив для каждого полового акта. Выбрасывайте использованный презерватив в корзину для мусора, никогда не бросайте его в унитаз, так как это может привести к засорению канализационных труб.
6. Презервативы предусмотрены для вагинального применения.
7. Не пользуйтесь презервативами с истекшим сроком хранения.

